

Link do produktu: <https://www.widzieciepiej.pl/aosept-plus-z-hydraglyde-360-ml-p-3521.html>

## AOSEPT® PLUS z HydraGlyde 360 ml

Cena	<b>43,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Alcon</b>

### Opis produktu

#### Dlaczego warto wybrać płyn AOSept Plus HydraGlyde?

Płyn pielęgnacyjny AOSept Plus Plus HydraGlyde powstał w oparciu o nową ulepszoną formułę. **HydraGlyde Moisture Matrix** pozwala na utrzymanie wilgoci. Tworzy na powierzchni soczewek warstwę ochronną, zapewniając optymalne nawilżenie przez cały dzień. Preparat polecany jest dla **wszystkich użytkowników szkieł kontaktowych**. W szczególności przeznaczony jest do oczu wrażliwych oraz dla użytkowników cierpiących na alergię.

**Nadtlenek wodoru** zawarty w płynie AOSept pozwala na dokładne oczyszczenie soczewek, bez konieczności czyszczenia mechanicznego. Do każdego płynu dołączony jest specjalny pojemnik na soczewki. Wyposażony jest on w **dysk neutralizujący**, który po 6 godzinach zamienia płyn w łagodny roztwór soli fizjologicznej.

Związek dezynfekujący (3% wody utlenionej) **zabija bakterie oraz zarazki**, które powodują infekcje oczu. Uwalniane podczas czyszczenia bąbelki dokładnie usuwają z powierzchni szkieł wszystkie osady białkowe. Poloxamer 407 to wbudowany surfaktant, który **usuwa wszystkie zabrudzenia** i osady. Dzięki czemu nie ma potrzeby czyszczenia mechanicznego soczewek kontaktowych. Preparat należy użyć w przeciągu 3 miesięcy od momentu otwarcia opakowania.

**UWAGA!** Do płynu dołączony jest specjalny pojemnik na soczewki. Podczas stosowania płynu AOSept nie wolno używać innych pojemników. Tylko i wyłącznie pojemnik dołączony do zestawu gwarantuje bezpieczne oczyszczenie soczewek. Nie wolno wkrapiać niezneutralizowanego płynu do oka.

#### Zalety AOSept Plus HydraGlyde

- skuteczne działanie oczyszczające
- odpowiednie nawilżenie
- specjalny pojemnik w zestawie
- gwarancja bezpieczeństwa

#### PARAMETRY PŁYNU PŁYN DO SOCZEWEK AOSEPT PLUS HYDRAGLYDE 360 ML

Opakowanie	1 szt.
Czas realizacji	do 24 godzin
Marka	AOSept
Typ	oksydacyjny płyn do pielęgnacji soczewek
Ważność płynu po otwarciu	90 dni
Zawartość opakowania	360 ml płynu do soczewek oraz pudełko na soczewki
Pojemność	200 ml - 360 ml

---

Aksesoria  
Aksesoria do soczewek twardych

Tak  
Nie

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą!**