

Link do produktu: <https://www.widzieclepiej.pl/menicon-progent-ampulki-intesywny-srodek-czyszczacy-p-3687.html>

## Menicon Progent ampułki intesywny środek czyszczący



Cena	<b>58,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>3503190011568</b>
Producent	<b>Menicon</b>

### Opis produktu

Menicon Progent 5 dawek to intensywny środek do czyszczenia twardych soczewek kontaktowych.

Służy do dezynfekcji i usuwania osadów białkowych. Skutecznie usuwa wirusy, bakterie oraz grzyby z powierzchni soczewek a po około 30 min. z powodzeniem usuwa osady białkowe i odtłuszcza soczewki.

Po zastosowaniu Menicon Progent zaleca się spłukanie soczewek płynem MeniCare Pure.

Przed zakupem zalecamy konsultację z kontaktologiem lub okulistą. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostępnej w środku opakowania.

### Jak stosować Menicon Progent?

- Należy zmieszać jedną dawkę A i jedną dawkę B w pojemniku;
- Zanurzyć soczewkę w roztworze na 30 minut (zanurzenie soczewki na więcej niż 30 minut może wywołać odbarwienia);
- DOKŁADNIE przemyć soczewkę i pojemnik roztworem Menicare Pure przez co najmniej 15 sekund;

### Skład opakowania Menicon Progent:

- Płyn A: NaClO 2 20.30 mg (woda oczyszczona do 5 ml/dawka);
- Płyn B: KBr 30.75 mg (woda oczyszczona do 5 ml/dawka);

Parametry techniczne

Producent [Menicon](#)

Pojemność 50 ml

Zastosowanie do soczewek sztywnych (twardych)