

Link do produktu: <https://www.widziecielepiej.pl/progent-intesywny-srodek-czyszczacy-p-3687.html>

Progent intesywny środek czyszczący



Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	3503190011568
Producent	Menicon

Opis produktu

Menicon Progent to silnie czyszczący środek, który nadaje się do wszystkich sztywnych, twardych soczewek kontaktowych. Przed zakupem zalecamy konsultację z kontaktologiem lub okulistą. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostępnej w środku opakowania.

Menicon Progent 5 dawek to niezwykle skuteczny środek stosowany do czyszczenia twardych soczewek kontaktowych. W czasie około 5 min. skutecznie usuwa wirusy, bakterie oraz grzyby z powierzchni "kontaktów", a po około 30 min. z powodzeniem usuwa białka i odtłuszcza soczewki. Po zastosowaniu Menicon Progent zaleca się spłukanie soczewek płynem MeniCare Pure.

Menicon Progent służy do:

- intensywnej dezynfekcji;
- usuwania osadów białkowych;

Jak stosować Menicon Progent?

- Należy zmieszać jedną dawkę A i jedną dawkę B w pojemniku;
- Zanurzyć soczewkę w roztworze na 30 minut (zanurzenie soczewki na więcej niż 30 minut może wywołać odbarwienia);
- DOKŁADNIE przemyć soczewkę i pojemnik roztworem Menicare Pure przez co najmniej 15 sekund;

Skład opakowania Menicon Progent:

- Płyn A: NaClO 2 20.30 mg (woda oczyszczona do 5 ml/dawka);
- Płyn B: KBr 30.75 mg (woda oczyszczona do 5 ml/dawka);

Parametry techniczne

Producent

[Menicon](#)

Pojemność

50 ml

Zastosowanie

do soczewek sztywnych (twardych)